

NOSOSURF PREMIUM

LES + PRODUITS :

Actions : Détergent désinfectant pour sol, surfaces, matériel et mobilier dans les domaines tertiaires, médicales* et paramédicales.

SANS Parfum



PROPRIÉTÉS :

Détergent désinfectant pour nettoyer les sols, les murs, le mobilier mais également matériels paramédicaux ou médicaux* (lits, tables d'opération, moniteurs...).

Bon pouvoir mouillant.

Sans Rinçage.

Efficace sur Coronavirus.

- Bactéricide
- Levuricide
- Fongicide
- Virucide
- Sporicide
- Mycobactéricide.

Son emploi est recommandé pour l'entretien régulier des locaux où peuvent se développer les micro-organismes. (milieu médical*, paramédical, maisons de retraite, écoles, lieux publics, collectivités, restaurants, hotels etc.). *Hors bloc opératoire.



MODE D'EMPLOI :

Utilisation manuelle ou en autolaveuse.

Diluer 30 mL dans 4 litres d'eau à température ambiante pour une désinfection bactéricide et levuricide en condition de saleté générale. Dilution, températures et temps de contact variables selon l'efficacité biocide recherchée. Se référer au tableau page 2 et 3.

La formule du détergent désinfectant NOSOSURF PREMIUM est soutenue au niveau du règlement biocide (CE) n°528/2012 en vue d'obtenir une AMM. Produit enregistré sous BioCID. Produit utilisé en TP2.



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

Aspect : Liquide limpide visqueux incolore

pH : 8.25 +/- 0.25

Densité : 0.995 +/- 0.01

Stockage : Pour une conservation optimale jusqu'à la DLU, conserver le produit à l'abri de la chaleur, de la lumière et du gel.

Type de préparation : SL – Concentré soluble.

Matière active :

BENZALKONIUM CHLORIDE [ADBAC/BKC (C12-C16)]

(N° CAS 6 8424-85-1) ; 25 g/kg

DIDECYLDIMETHYLAMMONIUM CHLORIDE

(N° CAS 7173-51-5) ; 25 g/kg



CONDITIONNEMENT / PALETTES :

Bidon de **1L DOSEUR** Réf. 002550006 - 384 bidons/palette

Bidon de **5L** Réf. 002550001 - 128 bidons/palette

SURFACE



21/08/2026 - V3

SALETÉ GÉNÉRALE

EFFICACITÉS DÉSINFECTANTES EN CONDITIONS DE SALETÉ GÉNÉRALE (BSA 3 G/L), USAGE EN TP2.

À 20°C

DÉSINFECTION AVEC ET SANS ACTION MÉCANIQUE	SOUCHES	NORMES	TEMPS DE CONTACT	DILUTION
Bactéricide	<i>Pseudomonas aeruginosa</i> <i>Escherichia coli</i> *	EN 1276 EN 13697 EN 16615	15 min.	0,75%
	<i>Staphylococcus aureus</i> <i>Enterococcus hirae</i>			
	<i>Listeria monocytogenes</i> <i>Salmonella enterica</i>			
	<i>Legionella pneumophila</i>		15 min.	1%
Levuricide	<i>Candida albicans</i>	EN 1650 EN 13697 EN 16615	15 min.	0,75%
Fongicide	<i>Aspergillus brasiliensis</i>	EN 1650 EN 13697**	30 min.	5%
Virucide (virus enveloppés)	MVA <i>Hcov229E</i>	EN 14476 EN 16777**	15 min.	1,5%

À 40°C

DÉSINFECTION AVEC ET SANS ACTION MÉCANIQUE	SOUCHES	NORMES	TEMPS DE CONTACT	DILUTION
Bactéricide	<i>Enterococcus faecium</i> <i>Listeria monocytogenes</i> <i>Salmonella enterica</i>	EN 1276 EN 16615 EN 1650 EN 13697	15 min.	0,75%
	<i>Legionella pneumophila</i> <i>Candida albicans</i>			
Levuricide				
Fongicide	<i>Aspergillus brasiliensis</i>	EN 1650 EN 13697**	15 min.	5%
			30 min.	4%
Virucide (virus enveloppés)	MVA <i>Hcov229E</i>	EN 14476 EN 16777**	15 min.	1%

* Souches non testées en EN 16615

**avec action mécanique : résultats extrapolés

SALETÉ MÉDICALE

EFFICACITÉS DÉSINFECTANTES EN CONDITIONS DE SALETÉ MÉDICALE (BSA 3 G/L + ÉRYTHROCYTES DE MOUTONS 3 ML/L), USAGE EN TP2.

À 20°C

DÉSINFECTION AVEC ET SANS ACTION MÉCANIQUE	SOUCHES	NORMES	TEMPS DE CONTACT	DILUTION
Bactéricide	<i>Pseudomonas aeruginosa</i> <i>Escherichia coli</i> * <i>Staphylococcus aureus</i> <i>Enterococcus hirae</i> <i>Listeria monocytogenes</i> <i>Salmonella enterica</i>	EN 13727 EN 17387 EN16615	15 min.	1,50%
Levuricide	<i>Candida albicans</i>	EN 13624 EN 17387 EN 16615	15 min.	2% sans action mécanique 1,5% avec action mécanique
Fongicide	<i>Aspergillus brasiliensis</i>	EN 1650 EN 13697**	45 min.	4%
Virucide (virus enveloppés)	MVA <i>Hcov 229E</i> <i>H1N1 humain</i>	EN 14476 EN 16777**	15 min.	2%
Mycobactéricide uniquement sans action mécanique	<i>Mycobacterium terrae</i> <i>Mycobacterium avium</i>	EN 14348	30 min.	5%
Sporicide uniquement sans action mécanique	<i>Bacillus subtilis</i> <i>Clostridium difficile</i> <i>Bacillus cereus</i>	EN 17126	60 min.	3%

À 40°C

DÉSINFECTION AVEC ET SANS ACTION MÉCANIQUE	SOUCHES	NORMES	TEMPS DE CONTACT	DILUTION
Bactéricide	<i>Enterococcus faecium</i> <i>Listeria monocytogenes</i> <i>Salmonella enterica</i>	EN 13727 EN 17387 EN16615	15 min.	1,50%
Levuricide	<i>Candida albicans</i>	EN 13624 EN 17387 EN 16615	15 min.	1,5% sans action mécanique 1% avec action mécanique
Fongicide	<i>Aspergillus brasiliensis</i>	EN 1650 EN 13697**	30 min.	4%
Virucide (virus enveloppés)	MVA <i>Hcov 229E</i>	EN 14476 EN 16777**	15 min.	1,5%
Sporicide uniquement sans action mécanique	<i>Bacillus subtilis</i> <i>Clostridium difficile</i> <i>Bacillus cereus</i>	EN 17126	60 min.	2%

* Souches non testées en EN 16615

**avec action mécanique : résultats extrapolés

**PRÉCAUTIONS D'EMPLOI :**

Produit strictement professionnel - Tenir hors de portée des enfants. Formule déposée au centre antipoison européen (PCN) (N°5500). Numéro de téléphone d'appel d'urgence ORFILA : + 33 (0)1 45 42 59 59. FDS disponible sur simple demande. Pour une question de sécurité, ne pas déconditionner le produit de son emballage d'origine et ne pas réutiliser l'emballage vide. Ne pas déverser dans les égouts ni dans les cours d'eau. Recycler ou éliminer de préférence par un collecteur ou une entreprise agréée. Utiliser les biocides avec précautions. Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit.

Ces informations données à titre indicatif sont le reflet de nos meilleures connaissances sur le sujet.

Elles ne sauraient en aucun cas engager notre responsabilité. Pour plus de détails, consulter la fiche technique. Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations le concernant.

21/08/2026 - V3